



GAMMA TONIC

Ref. TO4112 Orteza stawu skokowego

OPIS

Orteza stawu skokowego z 8 bandażami oraz bocznymi wzmocnieniami przeznaczona do stabilizacji kostki. Po obu stronach kostki zostały umieszczone dwie kieszenie, do których można wstawić nawet 4 szyny o różnej sztywności, w zależności od stopnia zwichnięcia kostki, ta specyficzna cecha wraz z 8 bandażami pozwala dostosować wymagany stopień unieruchomienia przy ruchach kostki w kierunku wywrotu i zmiany kierunku. Skuteczność usztywnienia zapewnia podwójne przednie zapięcia na rzep, pierwsze mocno stabilizuje kostkę poprzez owinięcie wokół stopy, druga dodatkowo wzmacnia efekt ściskania nad kostką, unikając efektu wiązania.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Dwie główne krawędzie zapięcia są wykonane z połączonego materiału składającego się z trzech różnych materiałów połączonych ze sobą elastycznym rzepem, materiałem z włókna węglowego 6, który zapewnia doskonałą wydajność, piankę o wysokiej gęstości. Charakterystyka każdego pojedynczego materiału pozwala na wysoką kompresję. Bandaż 8 zapewnia doskonałą stabilność boczno - przyśrodkową i jest łatwy w noszeniu dzięki opaskom na rzepy, które pozwalają regulować powiązane stalki.

PRZEZNACZENIE

Terapeutyczne i nieinwazyjne wyroby medyczne, których celem jest korygowanie wad postawy lub stabilizacji kończyn.

WSKAZANIA

Artroza kości piszczelowej, kości skokowej • tendinopatia kostki • tendinopatia okoliczna • zapobieganie przypadkowym uszkodzeniom uszkodzeń w sporcie • przydatne w przypadku uruchomienia sportu agonistycznego.

ZAŁOŻENIE

1. Otwórz zapięcia velcro pasów dociągowych, następnie zapięcie na łydce.
2. Załóż ortezę na kontuzjowaną nogę, zapnij zapięcie łydki na rzep.
3. Następnie pasy dociągowe zapnij na rzepy kierując je w taki sposób aby najpierw były prowadzone po sklepieniu (krzyżując je) potem pod piętę aż do góry.
4. Zapnij dwa przednie dociągi, aby zoptymalizować stabilność.



Tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com



info@tenortho.com



+39 039 8943960



tenortho

GAMMA TONIC

Ref. TO4112 Orteza stawu skokowego



ŁUDNOŚĆ I OGRANICZENIA W UŻYCIU

Urządzenia Tenortho są ogólnie wskazane do użytku u osób dorosłych powyżej 12 roku życia. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz ulotka z instrukcją, rozdział "Wskazania"). Niektóre urządzenia, które mają różne rozmiary, pediatryczne lub są wykonane na miarę, mogą być również używane u dzieci w wieku od 3 lat. Zaleca się ostrożność i zasięgnięcie porady lekarza przed użyciem jakichkolwiek urządzeń, które mogą zakłócać działanie macicy u kobiet w ciąży (kołnierze ze stabilizatorami mostkowo-grzbietowymi, pasy lędźwiowe, gorsety, ortezy barkowe i biodrowe itp.). Szczególną uwagę i dokładną ocenę lekarską należy zwrócić na stosowanie aparatów ortodontycznych, które mogą utrudniać oddychanie u pacjentów z patologiami lub trudnościami w oddychaniu (nadmierne rozciągnięcia, gorsety, kołnierze, szelki, itp.). Produkt zawierający magnetoterapię (TO1308MG - TENOMAG) nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży ani u osób z wszczepionymi urządzeniami (rozruszniki serca, defibrylatory lub implanty stałe). Zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta urządzenia do magnetoterapii.

KONSERWACJA

Jeśli to możliwe, usuń szyny i metalowe ramy przed praniem. Pierz ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła; następnie spłucz czystą wodą. Susz z dala od źródeł ciepła. Skontaktuj się z technikiem ortopedą w przypadku problemów lub zużytych części, które wymagają wymiany. Nie wyrzucać produktu do środowiska.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Urządzenie nie może wywierać nacisku na żadną część ciała, która jest zraniona lub opuchnięta. W przypadku wątpliwości co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia.

NADZÓR ZDROWOTNY

W celu ciągłej kontroli stanu zdrowia w celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego użytkowania produktów Tenortho, prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych działań niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres ufficiotecnico@tenortho.com. Należy również zgłosić zdarzenie właściwym organom.

OSTRZEŻENIA

Urządzenie musi być przepisane przez lekarza i założone przez technika ortopedę, który jest kompetentną osobą uprawnioną zarówno do zastosowania, jak i do udzielania informacji o bezpiecznym użytkowaniu. Założenie urządzenia musi być przeprowadzone z najwyższą starannością, aby zapewnić skuteczność, tolerancję i prawidłowe działanie. O wszelkich zmianach konstrukcyjnych i innych musi decydować lekarz i przeprowadzać je technik ortopeda. Zalecane jest użycie produktu przez jedną osobę. Bezpośredni kontakt urządzenia ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie u bardzo wrażliwych osób. Nie należy umieszczać produktu na zranionej skórze. W przypadku nietolerancji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

SPRZEDAŻ

Nie wyrzucać produktu do środowiska. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów obowiązującymi w gminie i / lub stanie. Produkt nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia.

GWARANCJA


Tenortho zaświadcza, że produkt został wyprodukowany poprawnie, zastosowano materiały najwyższej jakości, zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy oraz, że jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Tenortho zobowiązuje się naprawić wszelkie wady, brak jakości lub niezgodności Produktów, które nastąpiły z winy producenta, które powstaną w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dostawy Produktów, i które zostaną przekazane niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż siedem dni od dnia wykrycia wady lub usterki. Tenortho może podjąć decyzję o naprawie lub wymianie Produktów, które okażą się wadliwe. Produkty wymienione lub naprawione w ramach gwarancji będą objęte tą samą gwarancją przez 6 (sześć) miesięcy od dnia naprawy lub wymiany. Wady zgodności, a tym samym rękojmia, nie obejmują żadnych wad lub szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub z odpowiedzialności Użytkownika (np. Niedbałość, brak lub nieprawidłowe czyszczenie) lub używanie produktów niezgodne z ich przeznaczeniem lub normalnym zużyciem. Zachowaj opakowanie, etykiety i dowód zakupu, aby zapewnić odpowiednią identyfikowalność partii.



Prać ręcznie w ciepłej wodzie



Nie suszyć w suszarce

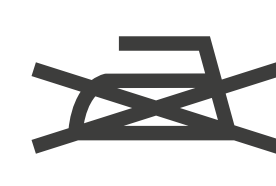

Nie prasować



Nie wybielać



Produkt zgodny z rozporządzeniem UE 745/2017 - wydany 04/2021 - wersja 0
Certyfikowana firma: system jakości certyfikowany zgodnie z ISO 9001: 2015 i ISO 13485: 2016



Producent

REF

Artykuł nr.

LOT

Numer LOT



Wyrób medyczny