



	OSS1/OSS1K (krótka)		
Rozmiar	S	M	L
Rozmiar buta	36/39	40/44	44/46,5

Orteza Stopowo Goleniowa OSS1, OSS1K

Cechy charakterystyczne:

- Pompowana komora zapewnia wysoki komfort noszenia oraz dokładne dopasowanie do stopy i dolnej części nogi
- Wykonany z lekkiego plastiku


Wskazania:

- Terapia pooperacyjna
- Kilkakrotne skręcenia kostki (3-go stopnia)
- Leczenie zachowawcze poważnych skręceń stawu skokowego
- Leczenie zachowawcze złamań kostki / stopy
- Pooperacyjne unieruchomienie złamań stopy / kostki / nogi
- Uszkodzenia więzadeł w obrębie stawu piszczelowo-skokowego


Sposób założenia ortozy



Włóż stopę i nogę do środka linera i zapnij ją dobrze

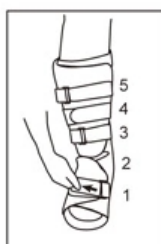

Zapnij wszystkie paski w odpowiedniej kolejności i mocno je zabezpiecz

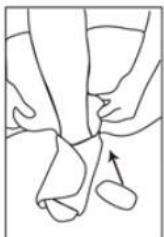

Możesz umieścić zestawy padów aby uzupełnić przestrzeń wewnętrzną lub między ramą buta, a miękkim materiałem



W celu napompowania buta naciśnij mocniej pompkę



Włóż owiniętą stopę w skorupę buta, tak aby kostki były obustronnie w osi w pozycji pionowej przed zdjęciem plastikowych osłon ze słupków, przed przyklejeniem do wkładki piankowej



Aby wypompować powietrze z komór naciśnij zawór znajdujący się poniżej pompki

Środki ostrożności



Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez wyrób nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała. W razie wątpliwości co do metody założenia wyrobu skontaktuj się ze specjalistą.

Nie jest wskazane używać wyrobu w sąsiedztwie otwartych płomieni

Instrukcja czyszczenia: Do czyszczenia należy używać łagodnego mydła i wody. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

Gwarancja: Gwarancja może zostać przyznana, jeśli produkt jest używany zgodnie z warunkami opisanymi w instrukcji przez jednego pacjenta.



ORTHO24 S.C. Bartosz Brzoza, Łukasz Mańka
ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, Polska
info@ortho24.pl
Tel: +48 730-000-417

Data wydania: sierpień 2021