

Orteza Stopowo – Goleniowa; REF: OSS3, OSS3K (krótka)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Deklaracja zgodności:

Jako producent, ORTHO24 Sp. z o.o. na własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt jest wyrobem medycznym klasy I i spełnia podstawowe wymogi Aneksu VII Dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. r dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r, Nr 876 ze zm.). Ocena zgodności została przeprowadzona na podstawie załącznika VII Dyrektywy Rady 93/42/EWG. Instrukcja jest wykonana zgodnie z wytycznymi tej dyrektywy, a jej celem jest właściwe użytkowanie wyrobu medycznego.

Rozmiary:

Pozycja	OSS3/OSS3K (krótka)			
Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	36/39	40/44	44/46,5	46,5+

Cechy charakterystyczne:

- Wzmocnienia części przedniej i tylnej, wykonane z lekkiego i wytrzymałego materiału
- Pompowana komora zapewnia wysoki komfort noszenia oraz dokładne dopasowanie do stopy i dolnej części nogi
- Wykonany z lekkiego plastiku

Wskazania:

- Terapia pooperacyjna
- Kilkakrotne skręcenia kostki (3-go stopnia)
- Leczenie zachowawcze poważnych skręceń stawu skokowego
- Leczenie zachowawcze ostrego uszkodzenia (zerwania) ścięgna Achillesa
- Leczenie zachowawcze złamań kostki / stopy
- Pooperacyjne unieruchomienie złamań stopy / kostki / nogi
- Pooperacyjne unieruchomienie ścięgna Achillesa (rekonstrukcja Achillesa)
- Uszkodzenia więzadeł w obrębie stawu piszczelowo-skokowego

Sposób założenia:

1. Otwórz wszystkie paski, tymczasowo zapnij je na siebie. Wyjmij wyściółkę z wewnątrz plastikowej osłony.
2. Otwórz wyściółkę i załóż na kontuzjowaną nogę tak, aby pięta była dobrze dopasowana, zapnij na rzepy Velcro (Rys. A).
3. Dopasuj przedni i tylni panel. Włóż but na nogę, rozciągając plastikowe wzmocnienia (Rys. B).
4. Dopasuj but tak, aby szyna była w pozycji pionowej i na środku stawu skokowego.
5. Zapnij rzepy, poczynawszy od tych znajdujących się najbliżej palców, kierując się w górę (Rys. C).
6. Napompuj komory powietrzne (Rys. D), będąc w pozycji siedzącej, tak, aby była zachowana odpowiednia kompresja. Personel wyznaczony do opieki zdrowotnej powinien nauczyć pacjenta, jak uzyskać przyczepność, komfort i odpowiednią kompresję, przy późniejszym założeniu buta przez pacjenta.
7. Jeśli jest to konieczne, zastosuj dodatkowo dostarczone podpiętki (opcja).



Rys. A.




Rys. B.



Rys. C.



Rys. D

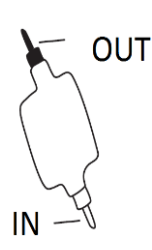

Rys. E

Pompowanie i wypuszczanie powietrza z poduszek pompowanych

1. Aby napompować komory powietrzne, zastosuj dostarczoną małą pompkę (Rys. D), włóż ją od strony z napisem "IN" (Rys. E).
2. Aby opróżnić z powietrza komory powietrzne, zastosuj dostarczoną małą pompkę (Rys. D), włóż ją od strony z napisem "OUT" (Rys. E).

Środki ostrożności

Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez urządzenie nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała. W razie wątpliwości, co do metody założenia urządzenia skontaktuj się ze specjalistą. Nie jest wskazane używać urządzenia w sąsiedztwie otwartych płomieni lub silnego pola elektromagnetycznego.

Ostrzeżenia

Orteza powinna być przepisana i używana pod kontrolą medyczną i założona przez technika ortopedycznego, który jest kompetentną osobą zarówno w odniesieniu do założenia jak i udzielenia informacji związanego z bezpiecznym użyciem urządzenia stosownie z indywidualnymi potrzebami.

W celu zapewnienia jego skuteczności, tolerancji i prawidłowego działania jest niezbędne zachowanie należytej staranności przy zakładaniu jej. Wszelkie zmiany w strukturze i ustawieniach urządzenia powinny być wskazane przez lekarza i kontrolowane przez technika ortopedycznego.

Zaleca się by orteza była używana tylko przez jednego pacjenta.

Dla nadwrażliwych pacjentów bezpośredni kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienia lub podrażnienia. W przypadku efektów niepożądanych takich jak ból, opuchlizna lub obrzęk skontaktuj się natychmiast z lekarzem.

Konserwacja

- Pranie ręczne w letniej wodzie w naturalnym mydle. Płukać delikatnie.
- Susz z dala od silnych źródeł ciepła.
- Komponenty plastikowe przemyj mokrą gąbką w letniej wodzie i naturalnym mydle, a potem przetrzyj suchą szmatką.
- Proszę usuwać urządzenie lub każdy jego komponent w odpowiednich do tego przeznaczonych punktach.



ORTHO24 Sp. z o.o., ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, Polska
info@ortho24.pl Tel: +48 730-000-417



Data wydania: marzec 2022