

## Stabilizator stawu łokciowego model: 304,308,309 - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi kliencie dziękujemy, że wybraliście państwo produkt firmy Aurafix. Produkty marki Aurafix wykonywane są z wysokiej jakości materiałów dla państwa komfortu i bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego instrukcją i zachować ją w razie potrzeby.

### Deklaracja zgodności

Produkt jest wyrobem medycznym klasy I i został wyprodukowany zgodnie z podstawowymi wymaganiami dyrektyw 93/42/EEC i 2007/47/EEC. Instrukcje zostały stworzone zgodnie ze specyfikacjami wyżej wymienionych dyrektyw. Mają one na celu zapewnienie bezpiecznego i właściwego korzystania z produktu medycznego.

### Wskazania:

- Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (łokieć golfisty),
- Zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty),
- dolegliwości bólowe w obrębie stawu łokciowego

### Przeciwwskazania:

- Ciężkie zranienia
- Zapalne obrażenia skóry
- Zaburzenia w krążeniu i czuciu w okolicach stawu łokciowego, w obrębie umiejscowienia produktu

### Założenie produktu:

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do twojego rozmiaru.
- Otwórz zapięcia Velcro jeśli występują
- W modelach z pelotą uciskową (Ref: 301-303-304-308-309) , upewnij się, że orteza działa na odpowiednią grupę mięśni.
- Założenie produktów (Ref: 303-308-309): przy zapaleniach nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty) zwrócić uwagę aby pelota uciskowa była umiejscowiona w punkcie gdzie zewnętrzne mięśnie są obrzęknięte, 4-5 cm poniżej łokcia, przy zapaleniach nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (łokieć golfisty) zwrócić uwagę aby pelota uciskowa była umiejscowiona w punkcie gdzie zewnętrzne mięśnie są obrzęknięte, 4-5 cm poniżej łokcia
- Kompres żelowy przechowuj w zamrażalce przez godzinę w celu jego schłodzenia (produkt Ref: 309). Czas oraz częstotliwość użycia kompresu żelowego powinna być ustalona przez fizjoterapeutę.
- Zapnij zapięcia Velcro jeśli występują.
- Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez produkt nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała poprzez ich sprawdzenie po 10 - 15 minutach po założeniu.

### Ważne informacje i środki ostrożności

Zaleca się by orteza była używana tylko przez jednego pacjenta. Orteza powinna być przepisana i używana pod kontrolą medyczną i założona przez technika ortopedycznego, który jest kompetentną osobą zarówno w odniesieniu do założenia jak i udzielenia informacji związanego z bezpiecznym użyciem produktu stosownie z indywidualnymi potrzebami. Upewnij się czy został dobrany odpowiedni rozmiar produktu. Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez urządzenie nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała. W razie wątpliwości co do metody założenia produktu skontaktuj się ze specjalistą. Nie jest wskazane używać produktu w sąsiedztwie otwartych płomieni lub silnego pola elektromagnetycznego. Firma nie odpowiada za użycie produktu nie z jego przeznaczeniem. W celu zapewnienia jego skuteczności, tolerancji i prawidłowego działania jest niezbędne zachowanie należytej staranności przy zakładaniu produktu. Wszelkie zmiany w strukturze i ustawieniach urządzenia powinny być wskazane przez lekarza i kontrolowane przez technika ortopedycznego. Dzielne używanie produktu powinno być określone przez lekarza. Używanie produktów kompresyjnych przez dłuższy czas może powodować zwiótczenie mięśni i prowadzić do ich zaniku. Produkty z neoprenu nie powinny być dłużej noszone niż 3 – 4 godzinny dziennie. W przypadku alergii na ciepło, nie powinno się nosić produktów neoprenowych bez zgody lekarza. W przypadku alergii na latex i gumę, a w produkcie są takie składniki to pomiędzy ciało a produkt powinna być założona bielizna. Dla nadwrażliwych pacjentów bezpośredni kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienia lub podrażnienia. W przypadku efektów niepożądanych takich jak ból, opuchlizna lub obrzęk skontaktuj się natychmiast z lekarzem.

### Konserwacja

- Należy zawsze przed użyciem sprawdzić czy orteza nie jest uszkodzona.
- Jeśli paski lub inne części ortezy są znacząco zużyte, musi być to naprawione, zastąpione przez technika ortopedycznego przed ponownym użyciem.
- Jeśli orteza weszła w kontakt z wodą morską lub brudem, należy przepłukać czystą wodą i suszyć na powietrzu.
- Orteza może być używana tylko przez jedną osobę.
- Proszę usuwać urządzenie lub każdy jego komponent w odpowiednich do tego przeznaczonych punktach. Prać ręcznie do 30 ° C; Nie prasować; Nie czyścić chemicznie; Nie używać wybielaczy; Nie wirować
- Pranie ręczne w letniej wodzie w naturalnym mydle. Płukać delikatnie.
- Susz z dala od silnych źródeł ciepła.
- Nie wystawiaj produktu na działanie słońca

### Gwarancja

Gwarancja może zostać przyznana, jeśli produkt jest używany zgodnie z warunkami opisanymi w instrukcji przez jednego pacjenta.

**Dane wytwórcy:** TSD SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adil Mahallesi, ekol caddesi No: 12/A 34935, Sultanbeyli İSTANBUL – TURKIYE

**Dystrybutor:** ORTHO24 Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, 75 Pułku Piechoty 1 tel: 730-000-417

Data aktualizacji: 01.2022

