

Gorset ortopedyczny AO-61 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi kliencie dziękujemy, że wybraliście państwo produkt firmy Aurafix. Produkty marki Aurafix wykonywane są z wysokiej jakości materiałów dla państwa komfortu i bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego instrukcją i zachować ją w razie potrzeby.

Deklaracja zgodności

Produkt jest wyrobem medycznym klasy I i został wyprodukowany zgodnie z podstawowymi wymaganiami dyrektyw 93/42/EEC i 2007/47/EEC. Instrukcje zostały stworzone zgodnie ze specyfikacjami wyżej wymienionych dyrektyw. Mają one na celu zapewnienie bezpiecznego i właściwego korzystania z produktu medycznego.

Wskazania:

- Dyskopatie - Ból lędźwiowy, postrzał - Rwa kulszowa - Zwężenie kanału kręgowego - Przykurcze mięśni - Łagodne urazy regionu lędźwiowo-krzyżowego - Choroba zwyrodnieniowa - Osteoporoza (tylko gorsety górnym ujęciem kręgosłupa) - Urazy kręgosłupa - Łagodna kifoza. Wskazania muszą być przepisane przez lekarza

Założenie produktu:

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do twojego rozmiaru.
- Powinno się pod produkt założyć bawełnianą bieliznę, taką, która się nie marszczy.
- W gorsetach lędźwiowo-krzyżowych upewnij się, że stalki z tył są dobrze dopasowane. Zapnij rzepy pasów dociągowych, po umieszczeniu ich z przodu na brzuchu tak aby z obu stron były symetrycznie ułożone.
- W gorsetach lędźwiowych z podpaszkami upewnij się, że stalki z tył są dobrze dopasowane. Zapnij rzepy pasów dociągowych, po umieszczeniu ich z przodu na brzuchu tak aby z obu stron były symetrycznie ułożone. Podpaski (pasy naramienne) prowadź pod pachami następnie skrzyżuj je z tył pleców i zapnij z przodu na gorset.
- W gorsetach krzyżowo-biodrowych po założeniu produktu w taki sposób aby był poniżej talii obejmując talerze kości biodrowych zapnij rzepy Velcro z przodu. Pasy dociągowe, prowadź między nogami w pachwinach, następnie zapnij je z przodu na brzuchu tak aby z obu stron były symetrycznie ułożone. Dostosuj odpowiednio ich napięcie.
- W gorsetach ciężowych upewnij się, że fiszby z tył są dobrze dopasowane. Zapnij rzepy pasów dociągowych, po umieszczeniu ich z przodu na brzuchu tak aby z obu stron były symetrycznie ułożone.
- W pasach przepuklinowych poduszka uciskowa ma być umiejscowiona z przodu w miejscu przepukliny.

Ważne informacje i środki ostrożności

Zaleca się by orteza była używana tylko przez jednego pacjenta. Orteza powinna być przepisana i używana pod kontrolą medyczną i założona przez technika ortopedycznego, który jest kompetentną osobą zarówno w odniesieniu do założenia jak i udzielenia informacji związanego z bezpiecznym użyciem produktu stosownie z indywidualnymi potrzebami. Upewnij się czy został dobrany odpowiedni rozmiar produktu. Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez urządzenie nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała. W razie wątpliwości co do metody założenia produktu skontaktuj się ze specjalistą. Nie jest wskazane używać produktu w sąsiedztwie otwartych płomieni lub silnego pola elektromagnetycznego. Firma nie odpowiada za użycie produktu nie z jego przeznaczeniem. W celu zapewnienia jego skuteczności, tolerancji i prawidłowego działania jest niezbędne zachowanie należytej staranności przy zakładaniu produktu. Wszelkie zmiany w strukturze i ustawieniach urządzenia powinny być wskazane przez lekarza i kontrolowane przez technika ortopedycznego. Dzielne używanie produktu powinno być określone przez lekarza. Używanie produktów kompresyjnych przez dłuższy czas może powodować zwiótkowanie mięśni i prowadzić do ich zaniku. Produkty z neoprenu nie powinny być dłużej noszone niż 3 – 4 godzinny dziennie. W przypadku alergii na ciepło, nie powinno się nosić produktów neoprenowych bez zgody lekarza. W przypadku alergii na latex i gumę, a w produkcie są takie składniki to pomiędzy ciało a produkt powinna być założona bielizna. Dla nadwrażliwych pacjentów bezpośredni kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienia lub podrażnienia. W przypadku efektów niepożądanych takich jak ból, opuchlizna lub obrzęk skontaktuj się natychmiast z lekarzem.

Konserwacja:

Należy zawsze przed użyciem sprawdzić czy orteza nie jest uszkodzona. Jeśli paski lub inne części ortozy są znacząco zużyte, musi być to naprawione, zastąpione przez technika ortopedycznego przed ponownym użyciem. Jeśli orteza weszła w kontakt z wodą morską lub brudem, należy przepłukać czystą wodą i suszyć na powietrzu. Orteza może być używana tylko przez jedną osobę. Proszę usuwać urządzenie lub każdy jego komponent w odpowiednich do tego przeznaczonych punktach. Prać ręcznie do 30 ° C; Nie prasować; Nie czyścić chemicznie; Nie używać wybielaczy; Nie wirować; Pranie ręczne w letniej wodzie w naturalnym mydle. Płukać delikatnie. Susz z dala od silnych źródeł ciepła. Nie wystawiaj produktu na działanie słońca

Gwarancja

Gwarancja może zostać przyznana, jeśli produkt jest używany zgodnie z warunkami opisanymi w instrukcji przez jednego pacjenta.

Dane wytwórcy: TSD SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adil Mahallesi, ekol caddesi No: 12/A 34935, Sultanbeyli İSTANBUL – TURKIYE. **Dystrybutor:** ORTHO24 Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, 75 Pułku Piechoty 1 tel: 730-000-417

Data aktualizacji: 01.2022

