

Orteza lędźwiowo-krzyżowa ze stawkami (26 cm) REF: OLK26

OT32 Wysoka orteza tułowia ze stawkami (32 cm) REF: OT32

OTP32 Wysoka orteza tułowia ze stawkami i podspaskami REF: OTP32

Konserwacja

- Przed praniem zapnij rzepy na przednią powierzchnię pasa. Wyjmij stalki. Proszę prać w siateczce ochronnej.
- Pranie ręczne w letniej wodzie do 30° w naturalnym mydle. Płukać delikatnie.
- Susz z dala od silnych źródeł ciepła. Przed założeniem upewnij się czy produkt jest kompletnie suchy.
- Proszę usuwać urządzenie lub każdy jego komponent w odpowiednich do tego przeznaczonych punktach.

Cechy charakterystyczne

- System prowadzenia pasków, cała powierzchnia z przodu możliwa do zapięcia rzepów
- 2 kieszenie do wsunięcia sztywnych szyn.
- Poduszki naramienne
- Przednie szybko-zapinające rzepy Velcro

Skład materiału:

Bawełniane, elastyczne włókna (Bawełna – 40%, Nylon – 30%, Poly- Viskoza – 15 % oraz Elastan - 15%)

Tabela rozmiarowa:

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód w klatce piersiowej [cm]	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Obwód w pasie [cm]	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120

Kolor: beżowy i czarny

Wskazania model

- Bóle pleców z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów lub kifozy
- Po złamaniach kręgow grzbietowych i górnych kręgow lędźwiowych
- Po złamaniach odcinka grzbietowo-lędźwiowego kręgosłupa , osteoporozie lub przerzutach

Przeciwwskazania: Brak

Założenie zaopatrzenia ortopedycznego, model OLK26, OT32 oraz OTP32

1. Otwórz gorset i tymczasowo przymocuj rzepy VELCRO pasów dociągowych na przednią powierzchnię ortezy. Orteza ma być założona tak aby metka wewnątrz była skierowana ku górze.
2. Załóż gorset i zapnij ją z przodu głównym zapięciem na rzepy VELCRO. Dopasuj go tak aby był założony równo i upewnij się, że zapięcie jest ustawione w osi.
UWAGA USTAWIENIE ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI GORSETU: z tyłu powinien się on rozpoczynać od bruzdy pośladowej.
3. Powoli dociągnij dociągi dolne i zamocuj je za pomocą rzepów Velcro z przodu.
4. **MODEL OTP32:** Umieść górne paski na ramionach, przeciągnij je pod pachami następnie skrzyżuj na plecach. Zapnij paski na rzep VELCRO z przodu gorsetu.

Środki ostrożności



Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez urządzenie nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała. W razie wątpliwości co do metody założenia urządzenia skontaktuj się ze specjalistą. Nie jest wskazane używać urządzenia w sąsiedztwie otwartych płomieni lub silnego pola elektromagnetycznego.

Ostrzeżenia

Orteza powinna być przepisana i używana pod kontrolą medyczną i założona przez technika ortopedycznego, który jest kompetentną osobą zarówno w odniesieniu do założenia jak i udzielenia informacji związanego z bezpiecznym użyciem urządzenia stosownie z indywidualnymi potrzebami. W celu zapewnienia jego skuteczności, tolerancji i prawidłowego działania jest niezbędne zachowanie należytej staranności przy zakładaniu jej. Wszelkie zmiany w strukturze i ustawieniach urządzenia powinny być wskazane przez lekarza i kontrolowane przez technika ortopedycznego. Zaleca się by orteza była używana tylko przez jednego pacjenta. Dla nadwrażliwych pacjentów bezpośredni kontakt ze skórą może powodować zaczerwienienia lub podrażnienia. W przypadku efektów niepożądanych takich jak ból, opuchlizna lub obrzęk skontaktuj się natychmiast z lekarzem.



ORTHO24 Sp. z o.o. ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, Polska info@ortho24.pl Tel: +48 730-000-417



Data wydania: marzec 2022