



TENY

Ref. TO1306

Modułowy gorset grzbietowo-lędźwiowy

OPIS

Wsparcie medyczno-ortopedyczne, funkcjonalne i dynamiczne prostujące i unieruchamiające kręgosłup. Rama ze stopu aluminium, lekka, regulowana i anatomiczna została zaprojektowana tak, aby wspierać kręgosłup w fizjologicznej, naturalnej pozycji. Anatomiczne paski na ramiona z elastycznego materiału wspierają prawidłowe ułożenie ramion. Konstrukcja wykonana z materiału 'Combined Resistex' - antystatyczna (zastosowane specjalne włókna przewodzące pochłaniają i rozpraszają ładunek elektryczny), oddychająca i termoregulacyjna, antybakteryjna i hipoalergiczna, wysoce wydajna (podczas ćwiczeń fizycznych zmniejsza stężenie kwasu mlekowego poprawiając krążenie krwi i natlenienie komórek). Niewielka waga i elastyczne paski zapinające gwarantują doskonałe dopasowanie anatomiczne. System regulowanych szlufek na wysokość pozwala na modulację nacisku grzbietowo-lędźwiowego oraz barków. Tylne kieszenie do wprowadzenia szyn grzbietowych umożliwiają modulację intensywności podparcia. Łatwy w dopasowaniu i ledwo widoczny.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Lekka aluminiowa rama, modelowana i doskonale dopasowana.
- Regulowana podpora tylna.
- Konstrukcja składa się z materiału C6Tex.
- Zapięcie na rzep z przodu i elastyczne paski z tyłu, regulowane w celu uzyskania odpowiedniego nacisku.
- Wysokość z przodu 17 cm, z tyłu 51 cm.

PRZEZNACZENIE

Terapeutyczne i nieinwazyjne urządzenia medyczne, zdolne do korygowania problemów z postawą.

PRZEZNACZENIE

Terapeutyczne i nieinwazyjne urządzenia medyczne, zdolne do korygowania problemów z postawą.

WSKAZANIA

- Osteoporoza
- Złamania urazowe
- Zapadnięcia kręgów grzbietowych i grzbietowo-lędźwiowych z powodu osteoporozy lub przerzutów
- Osteomalacja
- Artroza grzbietowo-lędźwiowa
- Jperkifoza
- Wczesna osteochondroza.

ZAŁOŻENIE

Nie nosić ortezy bezpośrednio na skórze.

1. Noś urządzenie w pozycji stojącej lub lepiej w pozycji leżącej.
2. Wybierz odpowiedni rozmiar i jeśli to konieczne, wyreguluj aluminiową ramę (lub podpory grzbietowe) w celu zwiększenia komfortu.
3. Rozepnij paski gorsetu mocując je tymczasowo na przednich bocznych skośnych paskach z rzepami.
4. Włóż paski do bocznych szlufek, zwracając uwagę, aby najpierw zrobić podwójną pętlę w wewnętrznym otworze, a następnie w zewnętrznym.
5. Tymczasowo przymocuj końce rzepu do taśmy na rzep na połączeniu między taśmą urządzenia a paskiem.
6. Załóż gorset, wkładając ramiona w paski naramienne.
7. Zamocuj środkowe zapięcie na rzep.
8. Napnij gorset mocując paski na środkowym przednim rzepie, po zdjęciu ich ze skośnej bocznej taśmy rzepowej.
9. W razie potrzeby wyreguluj wysokość tylnych pętli, zdejmując je i ponownie umieszczając na pionowej taśmie rzepowej.
10. Następnie zamocuj paski naramienne na środkowym przednim rzepie, po zdjęciu ich z taśmy rzepowej.
11. Jeśli taśmy na ramionach są zbyt długie, usuń końce rzepów, i odetnij ich nadmiar.



Tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com



info@tenortho.com



+39 039 8943960



tenortho



TENY

Ref. TO1306

Modułowy gorset grzbietowo-lędźwiowy

ŁUDNOŚĆ I OGRANICZENIA W UŻYCIU

Urządzenia Tenortho są ogólnie wskazane do użytku u osób dorosłych powyżej 12 roku życia. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz ulotka z instrukcją, rozdział "Wskazania"). Niektóre urządzenia, które mają różne rozmiary, pediatryczne lub są wykonane na miarę, mogą być również używane u dzieci w wieku od 3 lat. Zaleca się ostrożność i zasięgnięcie porady lekarza przed użyciem jakichkolwiek urządzeń, które mogą zakłócać działanie macicy u kobiet w ciąży (kołnierze ze stabilizatorami mostkowo-grzbietowymi, pasy lędźwiowe, gorsety, ortezy barkowe i biodrowe itp.). Szczególną uwagę i dokładną ocenę lekarską należy zwrócić na stosowanie aparatów ortodontycznych, które mogą utrudniać oddychanie u pacjentów z patologiami lub trudnościami w oddychaniu (nadmierne rozciągnięcia, gorsety, kołnierze, szelki, itp.). Produkt zawierający magnetoterapię (TO1308MG - TENOMAG) nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży ani u osób z wszczepionymi urządzeniami (rozruszniki serca, defibrylatory lub implanty stałe). Zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta urządzenia do magnetoterapii.

KONSERWACJA

Jeśli to możliwe, usuń szyny i metalowe ramy przed praniem. Pierz ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła; następnie spłucz czystą wodą. Susz z dala od źródeł ciepła. Skontaktuj się z technikiem ortopedą w przypadku problemów lub zużytych części, które wymagają wymiany. Nie wyrzucać produktu do środowiska.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Urządzenie nie może wywierać nacisku na żadną część ciała, która jest zraniona lub opuchnięta. W przypadku wątpliwości co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia.

NADZÓR ZDROWOTNY

W celu ciągłej kontroli stanu zdrowia w celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego użytkowania produktów Tenortho, prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych działań niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres ufficiotecnico@tenortho.com

Należy również zgłosić zdarzenie właściwym organom.

OSTRZEŻENIA

Urządzenie musi być przepisane przez lekarza i założone przez technika ortopedę, który jest kompetentną osobą uprawnioną zarówno do zastosowania, jak i do udzielania informacji o bezpiecznym użytkowaniu. Założenie urządzenia musi być przeprowadzone z najwyższą starannością, aby zapewnić skuteczność, tolerancję i prawidłowe działanie. O wszelkich zmianach konstrukcyjnych i innych musi decydować lekarz i przeprowadzać je technik ortopeda. Zalecane jest użycie produktu przez jedną osobę. Bezpośredni kontakt urządzenia ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie u bardzo wrażliwych osób. Nie należy umieszczać produktu na zranionej skórze. W przypadku nietolerancji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

SPRZEDAŻ

Nie wyrzucać produktu do środowiska. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów obowiązującymi w gminie i / lub stanie. Produkt nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia.

GWARANCJA


Tenortho zaświadcza, że produkt został wyprodukowany poprawnie, zastosowano materiały najwyższej jakości, zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy oraz, że jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Tenortho zobowiązuje się naprawić wszelkie wady, brak jakości lub niezgodności Produktów, które nastąpiły z winy producenta, które powstaną w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dostawy Produktów, i które zostaną przekazane niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż siedem dni od dnia wykrycia wady lub usterki. Tenortho może podjąć decyzję o naprawie lub wymianie Produktów, które okażą się wadliwe. Produkty wymienione lub naprawione w ramach gwarancji będą objęte tą samą gwarancją przez 6 (sześć) miesięcy od dnia naprawy lub wymiany. Wady zgodności, a tym samym rękojnia, nie obejmują żadnych wad lub szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub z odpowiedzialności Użytkownika (np. Niedbałość, brak lub nieprawidłowe czyszczenie) lub używanie produktów niezgodne z ich przeznaczeniem lub normalnym zużyciem. Zachowaj opakowanie, etykiety i dowód zakupu, aby zapewnić odpowiednią identyfikowalność partii.




Prać ręcznie w ciepłej wodzie



Nie suszyć w suszarce

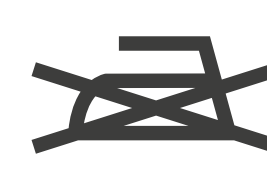

Nie prasować

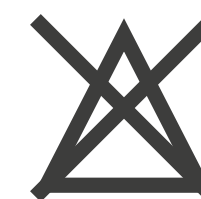

Nie wybielać



Produkt zgodny z rozporządzeniem UE 745/2017 - wydany 04/2021 - wersja 0
Certyfikowana firma: system jakości certyfikowany zgodnie z ISO 9001: 2015 i ISO 13485: 2016



Producent

REF

Artykuł nr.

LOT

Numer LOT



Wyrób medyczny