



# GENUTONIC

## Ref. TO3121

Otwarta orteza kolana z przegubowymi zawiasami i kontrolą zgięcia i wyprostowania (krótka)

### OPIS

Innowacyjne wsparcie medyczno-ortopedyczne. Rama wykonana z kalibrowanej, oddychającej elastycznej tkaniny zapewnia stabilizację stawu. Łatwy w noszeniu, świetnie dopasowany, nie posiada szwów w dole podkolanowym, co zapewnia doskonały komfort. Stabilizator wykonany z połączenia C6Tex z włóknem węglowym: antystatyczny, oddychający, termoregulacyjny, bakteriostatyczny, hipoalergiczny, obniża stężenie kwasu mlekowego, poprawiając przepływ krwi i dotlenienie komórkowe. Przednie otwarcie ułatwia jego założenie.

### CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- Tkanina C6Tex, elastyczna i w 100% oddychająca.
  - Wnętrze z efektem aksamitu dla zwiększenia komfortu.
  - Brak szwów w dole podkolanowym.
  - Otwieranie z przodu.
  - Łatwy system zamykania.
  - Tylne gumki dla lepszej stabilizacji.
- Szyny policentryczne z regulacją zgięcia-wyprostowania od 0° do 90°  
 zgięcie: 0°-15°-30°, 45°-60°-75°-90°;  
 wyprost: 15°-30°-45°;  
 unieruchomienie 0°-15°-30°-45°.
- Długość ortezy: 35 cm.

### PRZEZNACZENIE

Terapeutyczne i nieinwazyjne wyroby medyczne, zdolne do korygowania problemów z postawą lub zdolne do stabilizacji kończyn.

### WSKAZANIA

- Uraz zwichnięcia kolana
- Chondromalacja rzepki związana z rozluźnieniem więzadeł
- Stabilizacja boczna/przyśrodkowa
- Zapobieganie urazom zwichnięcia
- Niestabilność zwyrodnieniowa stawów
- Pomocna w leczeniu nieoperacyjnego stawu kolanowego.

### ZAŁOŻENIE

Wewnątrz opakowania znajdują się kliny ograniczające. Rozpoznawalne literami E (Extension - wyprost), F (Flexion - zgięcie), I (Imobilization - unieruchomienie) służące do regulacji zawiasu. Każda z nich jest oznaczona dwoma kropkami, które wskazują, w którą szczelinę zegara mają być wprowadzone, pionowo dla blokady zgięcia i poziomo dla blokady wyprostowania. Ustawienie wyprostowania: Włóż klin ograniczający wyprost z przodu zegara policentrycznego; element ograniczający zostanie magnetycznie zablokowany w szczelinie. Ustawienie zgięcia: Jeśli chcesz zablokować zgięcie kolana, włóż ogranicznik zgięcia z tyłu zegara policentrycznego.



**Tenortho**  
Get back in action

via Trento e Trieste, 100  
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com



info@tenortho.com



+39 039 8943960



tenortho





# GENUTONIC

## Ref. TO3121

Otwarta orteza kolana z przegubowymi zawiasami i kontrolą zgięcia i wyprostania (krótko)

### LUDNOŚĆ I OGRANICZENIA W UŻYCIU

Urządzenia Tenortho są ogólnie wskazane do użytku u osób dorosłych powyżej 12 roku życia. Produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz ulotka z instrukcją, rozdział "Wskazania"). Niektóre urządzenia, które mają różne rozmiary, pediatryczne lub są wykonane na miarę, mogą być również używane u dzieci w wieku od 3 lat. Zaleca się ostrożność i zasięgnięcie porady lekarza przed użyciem jakichkolwiek urządzeń, które mogą zakłócać działanie macicy u kobiet w ciąży (kołnierze ze stabilizatorami mostkowo-grzbietowymi, pasy lędźwiowe, gorsety, ortezy barkowe i biodrowe itp.). Szczególną uwagę i dokładną ocenę lekarską należy zwrócić na stosowanie aparatów ortodontycznych, które mogą utrudniać oddychanie u pacjentów z patologiami lub trudnościami w oddychaniu (nadmierne rozciągnięcia, gorsety, kołnierze, szelki, itp.). Produkt zawierający magnetoterapię (TO1308MG - TENOMAG) nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży ani u osób z wszczepionymi urządzeniami (rozruszniki serca, defibrylatory lub implanty stałe). Zapoznaj się z instrukcją obsługi producenta urządzenia do magnetoterapii.

### KONSERWACJA

Jeśli to możliwe, usuń szyny i metalowe ramy przed praniem. Pierz ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła; następnie splotcz czystą wodą. Susz z dala od źródeł ciepła. Skontaktuj się z technikiem ortopedą w przypadku problemów lub zużytych części, które wymagają wymiany. Nie wyrzucać produktu do środowiska.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Urządzenie nie może wywierać nacisku na żadną część ciała, która jest zraniona lub opuchnięta. W przypadku wątpliwości co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia.

### NADZÓR ZDROWOTNY

W celu ciągłej kontroli stanu zdrowia w celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego użytkownika produktów Tenortho, prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych działań niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania produktu, wysyłając wiadomość e-mail na adres [ufficiotecnico@tenortho.com](mailto:ufficiotecnico@tenortho.com)

Należy również zgłosić zdarzenie właściwym organom.

### OSTRZEŻENIA

Urządzenie musi być przepisane przez lekarza i założone przez technika ortopedę, który jest kompetentną osobą uprawnioną zarówno do zastosowania, jak i do udzielania informacji o bezpiecznym użytkowaniu. Założenie urządzenia musi być przeprowadzone z najwyższą starannością, aby zapewnić skuteczność, tolerancję i prawidłowe działanie. O wszelkich zmianach konstrukcyjnych i innych musi decydować lekarz i przeprowadzać je technik ortopeda. Zalecane jest użycie produktu przez jedną osobę. Bezpośredni kontakt urządzenia ze skórą może powodować zaczerwienienie lub podrażnienie u bardzo wrażliwych osób. Nie należy umieszczać produktu na zranionej skórze. W przypadku nietolerancji należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

### SPRZEDAŻ

Nie wyrzucać produktu do środowiska. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów obowiązuje w gminie i / lub stanie. Produkt nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia.

### GWARANCJA


Tenortho zaświadcza, że produkt został wyprodukowany poprawnie, zastosowano materiały najwyższej jakości, zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne testy oraz, że jest zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Tenortho zobowiązuje się naprawić wszelkie wady, brak jakości lub niezgodności Produktów, które nastąpiły z winy producenta, które powstaną w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dostawy Produktów, i które zostaną przekazane niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż siedem dni od dnia wykrycia wady lub usterki. Tenortho może podjąć decyzję o naprawie lub wymianie Produktów, które okażą się wadliwe. Produkty wymienione lub naprawione w ramach gwarancji będą objęte tą samą gwarancją przez 6 (sześć) miesięcy od dnia naprawy lub wymiany. Wady zgodności, a tym samym rękojnia, nie obejmują żadnych wad lub szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych lub z odpowiedzialności Użytkownika (np. Niedbałość, brak lub nieprawidłowe czyszczenie) lub używanie produktów niezgodne z ich przeznaczeniem lub normalnym zużyciem. Zachowaj opakowanie, etykiety i dowód zakupu, aby zapewnić odpowiednią identyfikowalność partii.



Prać ręcznie w ciepłej wodzie



Nie suszyć w suszarce

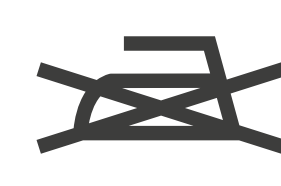

Nie prasować



Nie wybielać



Produkt zgodny z rozporządzeniem UE 745/2017 - wydany 04/2021 - wersja 0  
Certyfikowana firma: system jakości certyfikowany zgodnie z ISO 9001: 2015 i ISO 13485: 2016



Producent

REF

Artykuł nr.

LOT

Numer LOT



Wyrób medyczny