

## INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO



<b>ORTEZA NADGARSTKA</b>	<b>ONA1</b>
<b>ORTEZA NADGARSTKA Z UJĘCIEM KCIUKA</b>	<b>ONA2</b>
<b>ORTEZA NADGARSTKA DŁUGA (26 CM)</b>	<b>ONA3</b>

### Zakres dostawy:

- 1) Orteza nadgarstka wykonana z oddychającej trójwymiarowej tkaniny
- 2) Szyna aluminiowa – możliwość wyjęcia i modelowania
- 3) Szyna aluminiowa przy kciuku, - możliwość wyjęcia i modelowania (ONA2)

### Zastosowanie:

Ortezy nadgarstka ONA1 oraz ONA2 mają zastosowanie w zabezpieczeniu nadgarstka (ONA1), wraz z kciukiem (tylko ONA2). Orteza nadgarstka ONA3 ma zastosowanie w zabezpieczeniu nadgarstka oraz kości promieniowej i łokciowej

### Materiał:

Ortezy nadgarstka wykonane są z trójwymiarowego oddychającego materiału, z wyciąganymi, możliwymi do kształtowania szynami aluminiowymi (ONA2 – dodatkowa szyna kciuka). Wyposażone są w boczne wzmocnienia z tworzywa sztucznego. Ponadto są wyposażone w szybko zapinane rzepy Velcro®

### Używanie:

Bądź pewny, że Orteza nadgarstka jest dopasowana prawidłowo oraz założona wg . instrukcji.

### Rozmiary:

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka [cm]	10/13	13/16	16/18	18/20	20/23
Długość [cm]	26	26	26	26	26

**Kolor:** Czarny, Występuje: lewa lub prawa

### Wskazania:

- Zmiany kości łódeczkowatej,
- Zniekształcenia nadgarstka,
- Skutki złamania nadgarstka,
- Ciężkie skręcenia,
- Syndrom kanału nadgarstka,
- Łódkowaty staw rzekomy,
- Złożone złamania nadgarstka i przedramienia,
- Zapalenia ścięgien nadgarstka,
- Zwyrrodnienia stawu promieniowo – nadgarstkowego,
- Reumatoidalne zapalenie stawów,
- Choroba zwyrodnieniowa stawu nadgarstkowo – śródreźnego kciuka (ONA2),
- Uszkodzenie stawu śródreźno paliczkowego kciuka (ONA2)

### Założenie ortozy nadgarstka ONA1, ONA2 oraz ONA3

#### Pierwsze dopasowanie:

Jeśli jest to konieczne wyjmij szynę części dłoniowej, następnie dognij je do wymaganych potrzeb. Ponownie włóż szynę.

#### Późniejsze założenie (dla pacjenta):

Odepnij rzepy Velcro, Wyciągnij je z klamry. Następnie załóż stabilizator w taki sposób, aby dłoń leżała na aluminiowej szynie, a kciuk był umiejscowiony w przeznaczonym dla niego wycięciu. Chwyć centralny pasek wokół nadgarstka, przełóż go przez klamrę, dociągnij dożądanego ucisku i zapnij na rzepy Velcro.

To samo wykonaj z resztą pasków, najpierw dopnij pasek od strony dłoni, a potem od strony przedramienia.

Następnie zapnij rzep Velcro® na kciuku. – tylko ONA2



ORTHO24 Sp. z o.o. Bartosz Brzoza, Łukasz Mańka  
ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, Polska  
info@ortho24.pl  
Tel: +48 730-000-417

Data wydania: marzec 2021

Data wydania 09-2021