

KOD KATALOGOWY	AM-SP-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA PALCA RĘKI
MODEL	ORTEZA PALCA RĘKI AM-SP-05
CODE	AM-SP-05
TRADE NAME	FINGER SPLINT
MODEL	FINGER SPLINT AM-SP-05



- 1. PL:** Umieść kciuk i najmniejszy palec w ortezie.
EN: Put the thumb and the smallest finger in a brace.



- 2. PL:** Zapnij rzep (1).
EN: Fasten the Velcro closure (1).



- 3. PL:** Zapnij rzep (2).
EN: Fasten the Velcro closure (2).



- 4. PL:** Zapnij rzep (3).
EN: Fasten the Velcro closure (3).



- 5. PL:** Zwróć uwagę, aby zapięcie krzyżowe znajdowało się w odpowiednim miejscu.
EN: Make sure the cross straps are placed in a correct place.



- 6. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.