

ALUMINIOWA PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA CITY PC-01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wyrób medyczny

Nr katalogowy:	PC-01
Max. bezpieczne obciążenie:	136 kg
Regulacja wysokości uchwytów:	75-95 cm
Szerokość po rozłożeniu:	65 cm
Całkowita długość:	73 cm
Średnica koła:	20 cm
Wysokość siedziska:	53 cm
Głębokość siedziska:	25 cm
Szerokość siedziska:	45 cm
Waga:	8,2 kg
Max. bezpieczne obciążenie torby:	5 kg



Przed rozpoczęciem korzystania należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Podpórka przeznaczona jest do pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które wymagają wsparcia podczas wstawania, stania i chodzenia. Umożliwia samodzielną realizację codziennych czynności ruchowych. Może być użytkowany w pomieszczeniach i na zewnątrz. Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią dostawy. Będzie ona dostępna dla użytkownika i pozostanie w produkcie w momencie jej dostarczenia. W związku z postępem technicznym zastrzegamy sobie możliwość zmiany wersji opisanej w niniejszej instrukcji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W celu zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Zawsze przed użyciem podpórki upewnić się, że jest ona prawidłowo zablokowana w pozycji rozłożonej.
2. Zawsze przestrzegać minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej wysokości rur przesuwanych.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia podpórki i torby.
4. Nie wieszać się na uchwytach oraz nie wieszać na nich worków, toreb.
5. Nie przewozić w torbie elementów mocno wystających, ponieważ może to wpłynąć na stabilność.
6. Należy unikać potencjalnych zagrożeń takich jak nierówne, miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze mokra podłoga itp.
7. Używać hamulca głównego na stromych drogach.
8. Korzystanie z podpórki w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może spowodować korozję jej ruchomych elementów w konsekwencji uszkodzenie.
9. Stosować tylko oryginalne części, zamienniki mogą spowodować niestabilność podpórki.
10. Nie korzystać z podpórki podczas chodzenia po schodach, również schodach ruchomych.
11. Nie przechowywać podpórki w skrajnych temperaturach tj. okolice 0°C, 40°C. Może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub poparzenie użytkownika.
12. Używanie podpórki do celów innych niż chodzenie, takich jak transport ciężkich ładunków, jest nieodpowiednie i niebezpieczne.
13. Nie stosować jako zamiennik dla wózka inwalidzkiego.
14. Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.
15. Za mocne oparcie o ramę podpórki może spowodować przewrócenie się do tyłu.



Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.



Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu korzystania z podpórki, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.



Poniższa informacja to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z Twoim lekarzem lub rehabilitantem.



Jeżeli podpórka jest prawidłowo wyregulowana, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia część ciężaru ciała przejmuje podpórka.

ELEMENTY PODPÓRKI I MONTAŻ

Elementy są przedstawione na rys.1.

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE**Składanie:**

Zdejmij torbę na zakupy z ramy. Pociągnij do góry taśmę blokującą pośrodku siedziska – podpórka się złoży. Poluzuj śruby pokręteł przednich kół, a następnie złóż koła do góry. Użyj śrub z pokrętłami, aby zablokować koła w tej pozycji.

Rozkładanie:

Obiema rękami popchnij boczne rurki siedziska w dół i w prawo, aż mechanizm składania zatrzaśnie się na swoim miejscu. Nie dotykaj elementów pod siedzeniem, aby uniknąć obrażeń spowodowanych mechanizmem blokującym. Poluzuj śruby blokujące przednie koła, a następnie opuść koła. Użyj śrub blokujących, aby zablokować koła w tej pozycji. W razie potrzeby powieś torbę na zakupy.



Rys1.

HAMULCE:

Hamulec główny (podczas pchania): Pociągnij dźwignie hamulca do góry.

Hamulec postojowy (podczas parkowania i korzystania z funkcji fotela): Naciśnij dźwignie hamulca w dół.



Przed korzystaniem z podpórki sprawdź, czy hamulce działają prawidłowo i czy są dobrze wyregulowane. Upewnij się, że hamulce są zablokowane, gdy użytkownik siedzi na siedzisku. Na działanie hamulców może wpływać ścieranie kół.

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI

Rączki podpórki można regulować na wysokość, aby dopasować je do wzrostu użytkownika. Aby wyregulować wysokość, wciśnij kołki blokujące po lewej i prawej stronie, a następnie pociągnij kierownicę do góry, aż do uzyskania żądanej pozycji. Dostępnych jest osiem pozycji. Kołki zatrzaśkują się automatycznie.

TORBA

Torba jest zamontowana na rurce przy siedzisku podpórki. Maksymalne obciążenie torby to 5 kg.

UTYLIZACJA

W celu utylizacji produktu należy postępować zgodnie ze wszystkimi poradami zawartymi w broszurze. Utylizację należy przeprowadzić w firmie recyklingowej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą recyklingową.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie i dezynfekcję należy przeprowadzać w regularnych odstępach czasu. Użyj łagodnego roztworu mydła bez środków ściernych. Do dezynfekcji można zastosować standardowe metody. Nie używaj urządzeń do wstrzykiwania pary, szorowania ani żrących środków czyszczących.



Jeśli zachodzi taka konieczność, należy wymienić lub wyregulować odpowiednie części. W razie potrzeby należy nasmarować części mechaniczne.



Do czyszczenia podpórki nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych. Urządzenie można dezynfekować alkoholem lub pochodnymi, ale o niskim stężeniu.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

RAMA	aluminium
KOŁA	PVC (polichlorek winylu) + PP (polipropylen)
SIEDZISKO	PVC (polichlorek winylu)
HAMULEC	nylon
OPARCIE	nylon
TORBA	nylon
UCHWYTY	nylon

INSTRUKCJA OBRAZKOWA

Zawartość tuż po wyjęciu z kartonu widoczna na rys.2.

Otwórz zapakowany chodzik, opuść przednie koło i tylną nogę, użyj śrub z pokrętkami, aby mocno zamocować przednie koło i tylną nogę. Patrz rys.3.

Zawieś torbę. Użyj rzepu, aby przymocować torbę do ramy. Naciśnij srebrny kołek blokujący, aby dostosować wysokość uchwytu do wzrostu użytkownika, srebrny kołek blokujący musi zostać odbity od ramy, w celu blokady. Patrz rys.4.



Rys.2.



Rys.3



Rys.4



Pchnij w górę by odblokować hamulec lub wciśnij dźwignię by znów go zablokować. Patrz Rys.5.



① Naciśnij w dół: Podpórka zablokowana

② Wciśnij: Podpórka odblokowana

Rys.5.














Rys.6.



Jeśli istnieje potrzeba laski, należy włożyć dół do przygotowanego uchwytu, a górę przymocować rzepem jak na rys.6.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji użytkowania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatnie, obchodzić się ostrożnie
	Wyrób medyczny

**Ortho24 Sp. z o.o.**

ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, Polska

tel.: 730-000-417

e-mail: info@ortho24.pl www.ortho24.pl

Wer. 1.1

Wydano: 02.2023

NOTATKI

**ALUMINIOWA PODPÓRKA CZTEROKOŁOWA CITY PC-01
GWARANCJA UŻYTKOWANIA**

Wyrób medyczny

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczętka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Podpórka jest objęty 18 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę Ortho24 Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego, na adres 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - a. czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania;
 - b. części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - c. mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - d. uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Ortho24 Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

L.p.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady / Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					