



| | |
|----------------|-------------------------|
| KOD KATALOGOWY | FIX-KG-19 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| MODEL | FIX-KG-19 |
| CODE | FIX-KG-19 |
| TRADE NAME | UPPER-EXTREMITY SUPPORT |
| MODEL | FIX-KG-19 |

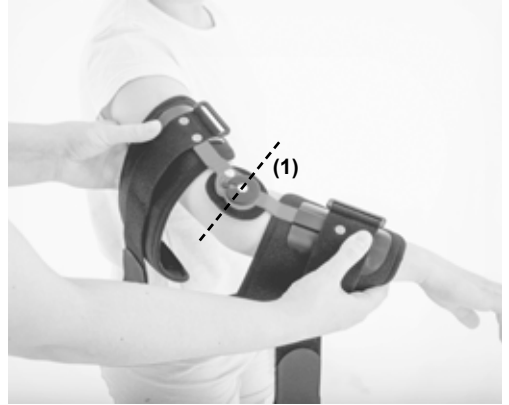



1. PL: Rozepnij ortezę i załóż na rękę w taki sposób, aby zegar szyny (1) znajdował się na nadkłykiu bocznym kości ramiennej.

EN: Unfasten the brace and place it on the upper limb. Remember to place the drop-lock (1) on the lateral epicondyle.

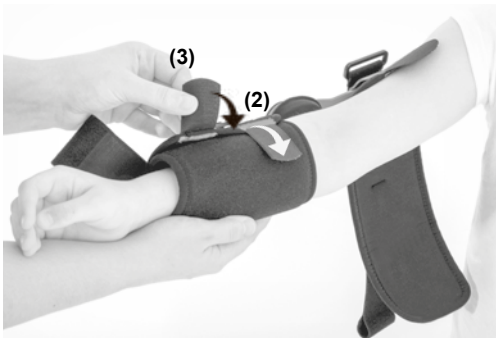

2. PL: Zapnij opaskę przedramienia na rzepy (2,3). Przepleć pasek (4) przez klamrę i zapnij na rzepy (5).

EN: Fasten the forearm band with Velcro (2,3). Interlace the strap (4) through the buckle and fasten with the Velcro (5).

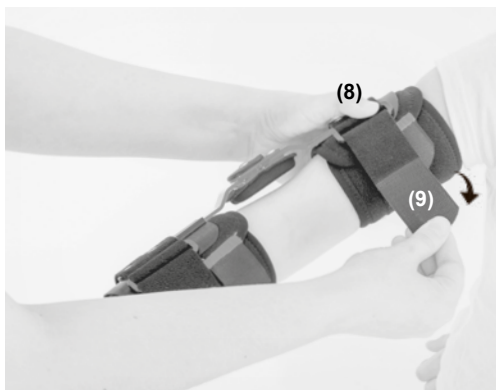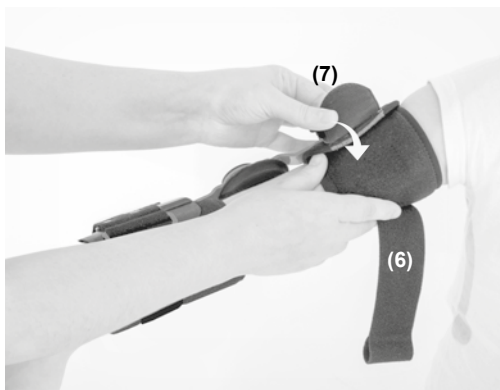

- 3. PL:** Zapnij opaskę ramienia (6) na rzep (7). Przepleć pasek (8) przez klamrę i zapnij na rzep (9).
EN: Fasten the arm band (6) with Velcro (7). Interlace the strap (8) through the buckle and fasten with Velcro (9).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.